



NÁVOD K POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU – NÁKUSNÁ RELAXAČNÍ DLAH PŘI TERAPII

ONEMOCNĚNÍ TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU (TMK)

Určený účel:

Určeným účelem relaxační dlahy MTK je umožnit volný pohyb čelistního kloubu bez artikulační překážky a tím snížení artikulačního tlaku v první fázi onemocnění TMK.

Cílová skupina:

Je zhotovená individuálně na zakázku a určena pro výlučné použití uživatelem, jemuž byla lékařem předepsána.

Indikace:

Terapie onemocnění TMK.

Výkonové charakteristické vlastnosti:

Individuálně zhotoveno. Určeno jako ochrana TMK před artikulační překážkou. Onemocnění TMK zahrnuje poruchy čelistního kloubu a žvýkacích svalů, které způsobují bolest, lupání či omezené otevírání úst. Vyrábí se z termoplastických fólií.

Klinický přínos:

Prostředek pomáhá relaxaci čelistního kloubu během spánku i během dne.

Kontraindikace:

Prostředek je zakázáno používat, pokud trpíte závažným akutním zánětem nebo jinými onemocněními ústní dutiny (např. paradentóza, absces) nebo pokud máte závažné potíže s čelistním kloubem (například zánět nebo dislokaci). Použití dlahy může v takovém případě zhoršit stav. Nejprve je třeba vyřešit akutní problémy.

Prostředek je zakázáno používat u pacientů s vysokou senzitivitou na materiál, z něhož je prostředek vyroben.

Alergické reakce v ústech se projevují jako začervenání, puchýřky, otoky, ekzém v ústech a subjektivní příznaky jako např. pálení, svědění, pocit tlaku, poruchy chuti, pocit chlupatosti a cizího tělesa. V případě jakýchkoliv problémů informujte svého zubního lékaře.

Pokyny k použití:

Vždy dbejte pokynů a poučení zubního lékaře a docházejte na pravidelné kontroly. Prostředek lze používat během dne i během spánku. Prostředek se nasazuje na horní, nebo dolní čelist. Ujistěte se, že dlaha dobře sedí na zubech a je pohodlná.

Pokud nosíte snímatelnou nebo fixní zubní náhradu, rovnátka nebo jiná ortodontická zařízení, může použití dlahy interferovat s léčbou. V takovém případě je důležité konzultovat stomatologa/ortodontistu, zda a jak je možné dlahu používat.

U osob s výrazně opotřebovanými nebo poškozenými zuby by mohlo být použití dlahy neúčinné nebo by mohlo zhoršit poškození. Pokud takové opotřebení nebo poškození pozorujete, kontaktujte stomatologa, zda není nutná rekonstrukční stomatologická léčba.

Velký pozor dávejte při konzumaci nápojů a potravin, které mohou zabarvit dlahu.

Vyvarujte se abnormálně vysokému zatěžování chrupu.



Pokyny k údržbě:

Pokud není prostředek dobře a pravidelně čištěn, dojde na něm k ulpívání nánosů zubního bakteriálního povlaku. Tento povlak pak způsobuje zánětlivá a kvasinková onemocnění dásní. Povlak rovněž přispívá k rychlejšímu stárnutí (degradaci) materiálů, ze kterých je prostředek zhotoven.

Péči o prostředek provádějte v rámci pravidelné hygieny dutiny ústní. K čištění používejte měkký kartáček a mýdlo, zubní pasta není vhodná, protože obsahuje abraziva.

Čištění lze doplnit použitím roztoku z čistících tablet na fóliové prostředky, některé mohou obsahovat i antibakteriální přísady. Postup je podle návodu konkrétního typu a výrobce.

Podmínky skladování:

Pokud není nasazen do úst, ponechávejte prostředek v původním obale.

Důležitá upozornění:

Pokud pocítíte nepohodlí, bolest, nebo si všimnete poškození prostředku, okamžitě kontaktujte svého zubního lékaře.

Poučení pro hlášení nežádoucích příhod:

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Likvidace:

Po ukončení používání prostředek vyhoďte v původním obale nebo v sáčku do komunálního odpadu.

NEPROVÁDĚT OPRAVY SVÉPOMOCÍ, PROTOŽE JE MOŽNÉ NENÁVRATNĚ POŠKODIT PROSTŘEDEK! Lepení, broušení ani jiné neodborné zásahy nejsou dovoleny. Opravy v záruční době se vztahují pouze na výrobní vady, nejedná se o pravidelný bezplatný servis. Opravy musí být provedeny odborně ve stomatologické laboratoři, materiálem a způsobem k tomu určeným.

