

NÁVOD K POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU – NOSIČ NA BĚLENÍ**Určený účel:**

Určeným účelem nosiče na bělení je ochrana při bělení zubů.

Cílová skupina:

Je zhotoven individuálně na zakázku a určen pro výlučné použití uživatelem, jemuž byl lékařem předepsán.

Indikace:

Ochrana úst při bělení zubů

Výkonové charakteristické vlastnosti:

Individuálně zhotoveno. Mechanická ochrana úst před bělicím prostředkem naneseným na zuby. Zároveň zajišťuje, že bělicí prostředek zůstává rovnoměrně rozložen na povrchu zubů a neodstraní se předčasně mechanickým třením (například jazykem).

Klinický přínos:

Chrání ústní dutinu před poškozením bělicím prostředkem.

Kontraindikace:

Prostředek je zakázáno používat, pokud trpíte závažným akutním zánětem nebo jinými onemocněními ústní dutiny (např. paradentóza, absces) nebo pokud máte závažné potíže s čelistním kloubem (například zánět nebo dislokaci). Použití nosiče může v takovém případě zhoršit stav. Nejprve je třeba vyřešit akutní problémy.

Prostředek je zakázáno používat u pacientů s vysokou senzitivitou na materiál, z něhož je prostředek vyroben.

Alergické reakce v ústech se projevují jako začervenání, puchýřky, otoky, ekzém v ústech a subjektivní příznaky jako např. pálení, svědění, pocit tlaku, poruchy chuti, pocit chlupatosti a cizího tělesa. V případě jakýchkoliv problémů informujte svého zubního lékaře.

Pokyny k použití:

Vždy dbejte pokynů a poučení zubního lékaře a docházejte na pravidelné kontroly. Před použitím nosiče si vyčistěte zuby. Dodržujte pokyny výrobce bělicího prostředku. Naplňte nosič vytvořením jedné souvislé linky bělicího prostředku přibližně do poloviny výšky od řezákové hrany na lící straně nosiče od stoličky ke stoličce. Umístěte nosič na zuby. Jemně jej přitlačte na zuby. Příliš silné přitlačení může vytlačit bělicí prostředek z nosiče. Pokud se vytlačí bělicí prostředek z nosiče, umyjte jej vodou a kartáčkem. Ujistěte se, že nosič dobře sedí a je pohodlný.

Pokud nosíte snímatelnou nebo fixní zubní náhradu, rovnátka nebo jiná ortodontická zařízení, může použití nosiče interferovat s léčbou. V takovém případě je důležité konzultovat stomatologa/ortodontistu, zda a jak je možné nosič používat.

Během používání nekonzumujte nápoje a potraviny, nekuřte a nezatěžujte chrup.

Po použití prostředek vyčistěte podle instrukcí níže.

Pokyny k údržbě:

K čištění používejte měkký kartáček a mýdlo, zubní pasta není vhodná, protože obsahuje abraziva.

Čištění lze doplnit použitím roztoku z čistících tablet na fóliové prostředky, některé mohou obsahovat i antibakteriální přísady. Postup je podle návodu konkrétního typu a výrobce.



Podmínky skladování:

Pokud není nasazen do úst, ponechávejte prostředek v původním obale.

Důležitá upozornění:

Pokud pocítíte nepohodlí, bolest, nebo si všimnete poškození prostředku, okamžitě kontaktujte svého zubního lékaře.

Poučení pro hlášení nežádoucích příhod:

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být hlášena výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Likvidace:

Po ukončení používání prostředek vyhodte v původním obale nebo v sáčku do komunálního odpadu.

NEPROVÁDĚT OPRAVY SVÉPOMOCÍ, PROTOŽE JE MOŽNÉ NENÁVRATNĚ POŠKODIT PROSTŘEDEK! Lepení, broušení ani jiné neodborné zásahy nejsou dovoleny. Opravy v záruční době se vztahují pouze na výrobní vady, nejedná se o pravidelný bezplatný servis. Opravy musí být provedeny odborně ve stomatologické laboratoři, materiálem a způsobem k tomu určeným.

