



NÁVOD K POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU – RETAINER

Určený účel:

Určeným účelem retaineru je napravení, narovnání, usměrnění polohy či zajištění retence jednotlivých zubů.

Cílová skupina:

Je zhotoven individuálně na zakázku a určen pro výlučné použití uživatelem, jemuž byl lékařem předepsán.

Indikace:

Ortodontické aparáty jsou indikovány na základě doporučení zubního lékaře. Jsou indikovány v případech nesprávného postavení zubů, vad skusu nebo pro ovlivnění růstu čelistí.

Výkonové charakteristické vlastnosti:

Individuálně zhotoven. Retainer se používá po odstranění fixních rovnátek. Jeho hlavní funkcí je zabránit tomu, aby se zuby vrátily zpět do původní nesprávné polohy. Používání retaineru je klíčové pro dlouhodobé udržení výsledků ortodontické léčby.

Klinický přínos:

Retainer poskytuje potřebnou podporu, aby zuby zůstaly na místě a nedošlo k relapsu (návratu zubů do původní polohy).

Kontraindikace:

Prostředek je zakázáno používat, pokud trpíte závažným akutním zánětem nebo jinými onemocněními ústní dutiny (např. paradentóza, absces). Použití aparátu může v takovém případě zhoršit stav. Nejprve je třeba vyřešit akutní problémy.

Prostředek je zakázáno používat u pacientů s vysokou senzitivitou na materiál, z nichž je prostředek vyroben.

Pro výrobu se používají plastové materiály a kovové slitiny s obsahem prvků, které mohou vyvolat potencionální citlivost u alergiků. Slitiny obecných kovů zpravidla obsahují Cr, Co, Mo, Si, bývají bez Be, In, Ga, Cd a Fe. Některé použité slitiny obsahují nikl.

Alergické reakce v ústech se projevují jako začervenání, puchýřky, otoky, ekzém v ústech a subjektivní příznaky jako např. pálení, svědění, pocit tlaku, poruchy chuti, pocit chlupatosti a cizího tělesa. V případě jakýchkoliv problémů informujte svého zubního lékaře.

Pokyny k použití:

Vždy dbejte pokynů a poučení zubního lékaře a docházejte na pravidelné kontroly. Před nasazením retaineru si vyčistěte zuby. Jemně umístěte retainer na zuby a mírně zatlačte, aby dobře seděl. Nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození. Retainer by měl pohodlně sedět, neměl by tláčit nebo být volný.

Nosit retainer můžete vždy (kromě jídla, pití horkých nápojů, čištění zubů a používání zubní nitě), dokud vám lékař nedá jiný pokyn. Při vyjmutí z úst retainer vždy uložte zpět do původního obalu. Předejdete tak ztrátě nebo poškození.

Velký pozor dávejte při konzumaci nápojů a potravin, které mohou zabarvit retainer.

Vyvarujte se abnormálně vysokému zatěžování chrupu.



Pokyny k údržbě:

Pokud není prostředek dobře a pravidelně čištěn, dojde na něm k ulpívání nánosů zubního bakteriálního povlaku. Tento povlak pak způsobuje zánětlivá a kvasinková onemocnění dásní. Povlak rovněž přispívá k rychlejšímu stárnutí (degradaci) materiálů, ze kterých je prostředek zhotoven.

Péči o prostředek provádějte v rámci pravidelné hygieny dutiny ústní. K čištění používejte měkký kartáček a mýdlo, zubní pasta není vhodná, protože obsahuje abraziva.

Čištění lze doplnit použitím roztoku z čistících tablet na ortodontické aparáty, některé mohou obsahovat i antibakteriální přísady. Postup je podle návodu konkrétního typu a výrobce.

Podmínky skladování:

Pokud není nasazen do úst, ponechávejte prostředek v původním obale.

Důležitá upozornění:

Pokud pocítíte nepohodlí, bolest, nebo si všimnete poškození prostředku, okamžitě kontaktujte svého zubního lékaře.

Poučení pro hlášení nežádoucích příhod:

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Likvidace:

Po ukončení používání prostředek vyhoďte v původním obale nebo v sáčku do komunálního odpadu.

NEPROVÁDĚT OPRAVY SVÉPOMOCÍ, PROTOŽE JE MOŽNÉ NENÁVRATNĚ POŠKODIT PROSTŘEDEK! Lepení, broušení ani jiné neodborné zásahy nejsou dovoleny. Opravy v záruční době se vztahují pouze na výrobní vady, nejedná se o pravidelný bezplatný servis. Opravy musí být provedeny odborně ve stomatologické laboratoři, materiálem a způsobem k tomu určeným.

